

## Vous venez de recevoir une mallette de prélèvement QUEST BIOLOGIE-BIOLOR


Cette sacoche de prélèvement est uniquement destinée à transporter le matériel de prélèvement et les prélèvements effectués à l'attention du laboratoire Ouest Biologie-Biolor. Cette sacoche a été qualifiée par laboratoire à cette fin. Ce moyen de transport permet de respecter la réglementation ADR et de garantir la conservation des prélèvements à température maîtrisée durant l'acheminement au laboratoire ou au point de collecte.

Celle-ci est **isotherme** et non réfrigérée ou chauffée donc **NE PAS laisser la mallette dans votre véhicule** en cas de températures extrêmes (ex : en plein soleil ou la nuit l'hiver).

***Le laboratoire décline toute responsabilité sur la fiabilité des résultats d'analyse en cas de non-respect de ces consignes.***



Portoir de tube en mousse

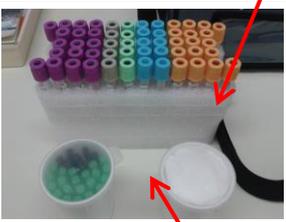

Sachet de transport URGENT (rouge): A utiliser **UNIQUEMENT** pour les analyses qui doivent être traitées en priorité



Lingettes désinfectantes, aiguilles et coton

Corps de pompe



Sachet de transport (transparents) pour la « routine »

Poche destinée à transporter les prélèvements une fois effectués

Réserve de tubes sous la mousse



Rem : Il s'agit d'une suggestion de présentation ; vous pouvez bien évidemment adapter l'aménagement de la sacoche à votre pratique quotidienne.

Fiches de prélèvement à **remplir dûment et systématiquement**

(Rappel de point important et accès au manuel en ligne)

