

Recherche d'oeufs de bilharzies (ou shistosomes) dans les urines



Matériel à utiliser pour le prélèvement :

Flacon à urines de 24 heures

Protocole de recueil :

Identifier le flacon : Nom, Prénom, date de naissance.

Compléter la fiche de renseignements avec **la date et l'heure du recueil et les renseignements cliniques.**

Au lever, recueillir la totalité des urines dans le flacon.

Transmettre au laboratoire :

Le flacon identifié (**bien visser le bouchon**) + la fiche de renseignements complétée.

Délais de transmission au laboratoire :

dans les 2 heures à température ambiante.